

Begleitschreiben – Labordiagnostik

Quantiferon-TB-Gold-Test:

Informationen zu Indikationen und Prä-Analytik

Wir bitten Sie, die folgenden Informationen zu beachten:

Der Quantiferon-Test ist nur unter bestimmten Indikationen eine Leistung gemäß EBM / Kassenleistung (EBM-Ziffer 32670).

Eine Durchführung ist danach ausschließlich vorgesehen bei Patienten:

- Vor Einleitung einer Behandlung mit einem Arzneimittel, für das der Ausschluss einer latenten oder aktiven Tuberkulose in der Fachinformation (Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels / Summary of Product Characteristics) des Herstellers gefordert wird
- Mit einer HI-Virus Infektion nur vor einer Therapieentscheidung einer behandlungsbedürftigen Infektion mit Mycobacterium-tuberculosis-complex (außer BCG)
- Vor Einleitung einer Dialysebehandlung bei chronischer Niereninsuffizienz
- Vor Durchführung einer Organtransplantation (Niere, Herz, Lunge, Leber, Pankreas)

Eine Bearbeitung ist unsererseits nur bei Angabe der zutreffenden Indikation möglich. Wir bitten deshalb, diese unbedingt auf dem Überweisungsschein zu vermerken!

Eine Durchführung **außerhalb** dieser Indikationen ist nur als **IGeL-Leistung** möglich.


Hierzu gehören z.B.:

- Umgebungsuntersuchungen von Kontaktpersonen, d.h. nach einem Risikokontakt mit einem an Tuberkulose Erkrankten
- Screening-Untersuchungen, z.B. im Rahmen der arbeitsmedizinischen Vorsorge
- Im Rahmen der Diagnostik bei Verdacht auf eine aktive Tuberkulose als unterstützende Aussage

Kosten als IGeL-Leistung: 78,69 €; ggf. zuzüglich Versandkosten; ggf. zuzüglich Blutentnahme

Wesentlich zur Erzielung auswertbarer und korrekter Ergebnisse ist die exakte Einhaltung der präanalytischen Vorgaben.

Wir bitten Sie daher diese strikt zu beachten!

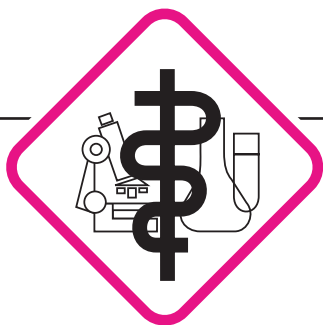

Präanalytisches Vorgehen in der Praxis

1. Einsendung von vier Spezialröhrchen (mit Füllung bis zur Markierung!):

Um eine korrekte Weiterverarbeitung unsererseits gewährleisten zu können, benötigen wir **zwingend** die Angabe, ob die Röhrchen **inkubiert** wurden und falls ja, für **wie viele Stunden**.

Inkubation	Zentrifugation	Versand	Temp. für Lagerung und Versand	Nötige Angaben auf dem Überweisungsschein
NEIN	NEIN	am gleichen Tag: Entnahme direkt oder kurz vor Eintreffen unseres Labor-Kuriers	Raumtemperatur	Bitte auf dem Überweisungsschein vermerken: „ nicht inkubiert “!
JA (umgehend nach Blutentnahme; stehend; 37°C, 16-24 Stunden)	NEIN	Versand innerhalb von 3 Tagen	4-27°C	Bitte auf dem Überweisungsschein vermerken: „ inkubiert “ und unbedingt die Inkubationsdauer angeben!
JA (umgehend nach Blutentnahme; stehend; 37°C, 16-24 Stunden)	JA (15 Minuten; 2000 - 3000 x g)	Versand innerhalb von 1 Woche	2-8°C	Bitte auf dem Überweisungsschein vermerken: „ inkubiert und zentrifugiert “ und unbedingt die Inkubationsdauer angeben!

2. Alternative Abnahme Möglichkeit: Lithium Heparin Blut (mindestens 5 ml):

- Blutentnahme** (mit üblichem Testbesteck) vormittags bzw. **kurz vor Eintreffen unseres Labor-Kuriers**. Nach Entnahme Lithium Heparin Blut vorsichtig mischen / schwenken.
- Notieren Sie die Uhrzeit der Blutentnahme** auf dem Überweisungsschein.
- Lagerung und Versand zwingend** am Entnahmetag und bei Raumtemperatur (**22°C ± 5°C**).
- Geben Sie das Röhrchen zum Versand in eine separate, durchsichtige Tüte, die Sie mit einem entsprechenden Hinweis versehen (**Aufkleber: „ACHTUNG! Transport bei Raumtemperatur“**) und dem Kurier mit diesem Hinweis direkt übergeben.

WICHTIG!

Um korrekte Analyseergebnisse zu erhalten, **müssen** diese Vorgaben des Herstellers **unbedingt** eingehalten werden.